



**1**  
Hände mit warmem Wasser reinigen, danach gut trocknen



**2**  
Streifen entnehmen und Behälter sofort wieder verschließen



**3**  
Streifen einführen, Gerät schaltet sich automatisch ein



**4**  
Aufsatz an blauem Ring von Stechgerät abdrehen



**5**  
Lanzette einführen und grüne Kappe abdrehen



**6**  
Aufsatz festdrehen und die Stechtiefe einstellen



**7**  
Stechgerät am hinteren Ende aufziehen



**8**  
Stechgerät seitlich ansetzen und grünen Knopf drücken



**9**  
Ein kleiner Blutstropfen ist völlig ausreichend



**10**  
Streifenspitze gerade an Blutstropfen ansetzen



**11**  
Sobald genug Blut aufgesaugt wurde, erfolgt die Messung



**12**  
Wert eintragen und entsprechend ihrer Therapie handeln

# GlucoMen<sup>®</sup> areo 2K

Streifeneinschub

Ein/Aus



Auf

Ab

Datum

Uhrzeit

## Wie rufe ich gespeicherte Ergebnisse wieder ab?





1. Vergewissern Sie sich, dass das Messgerät ausgeschaltet ist (halten Sie zum Ausschalten des Gerätes die Taste  $\odot$  3 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Display ausschaltet).
2. Halten Sie die Taste  $\odot$  2 Sekunden lang gedrückt, um das Messgerät einzuschalten und den Speicher aufzurufen (im Display erscheint das Symbol „mem“).
3. Das jüngste Messergebnis erscheint im Display. Das Display zeigt außerdem das Datum und die Uhrzeit des Tests sowie die zugehörigen Markierungen an.
4. Drücken Sie  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$ , um alle gespeicherten Daten zu durchlaufen.
5. Halten Sie die Taste  $\odot$  3 Sekunden lang gedrückt, um das Messgerät auszuschalten.

## Was bedeuten folgende Fehlermeldungen?

- Er 1** Hardwarefehler  $\rightarrow$  wenden Sie sich an unser Serviceteam (Tel. 01/230 85 10)
- Er 2** Teststreifen benutzt oder beschädigt  $\rightarrow$  verwenden Sie einen neuen Teststreifen
- Er 3** Blutprobenfehler  $\rightarrow$  einen neuen Teststreifen verwenden und mehr Blut auftragen
- Er 4** Teststreifen zu früh entfernt  $\rightarrow$  Messung mit einem neuen Teststreifen wiederholen

## Markierung von Messwerten

Während der Anzeige des Blutzuckerwertes und vor Entfernen des Teststreifens besteht die Möglichkeit, den Messwert zu markieren.

-  **Markierung „vor einer Mahlzeit“**
-  **Markierung „nach einer Mahlzeit“**
-  **Markierung für Sport**
-  **Check-Symbol**

## SICHERHEITSHINWEISE

- Die Teststreifen dürfen nur in ihrem Originalbehälter aufbewahrt werden. Füllen Sie sie zum Schutz vor Beschädigung nicht in andere Behälter um.
- Den Behälter nach jeder Anwendung sofort wieder verschließen: Wenn der Behälter in Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit längere Zeit offen bleibt, können die Teststreifen den Blutzuckerwert überschätzen.
- Messergebnisse werden durch hohe und tiefe Temperaturen beeinflusst. Damit die Messung korrekt funktioniert, müssen Messgerät und Teststreifen bei der Messung die gleiche Temperatur haben.

## Produkte für Sie im Überblick



Blutzucker-Teststreifen  
**GlucoMen<sup>®</sup> areo Sensor**  
1 Packung enthält 50 Teststreifen.  
PZN: 4243722  
Produktcode: 46193

Lanzetten  
**Glucoject<sup>®</sup> Lancets Plus**

1 Packung enthält 200 Lanzetten.  
PZN: 4195271  
Produktcode: 44123



**GlucoMen<sup>®</sup> areo  $\beta$ -Ketone Sensor**  
1 Packung enthält 10 Teststreifen.  
PZN: 4606107  
Produktcode: 48103